

Directives d'assemblage

1. Retirez toutes les pièces de la boîte et consultez la Figure 1 pour vous familiariser avec chacune d'elles.

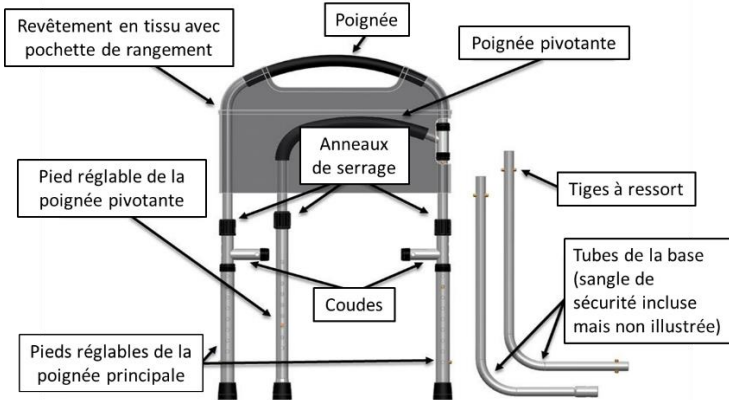


FIGURE 1

2. Déterminez de quel bord du lit sera installé le produit, tel qu'illustré à la Figure 2.

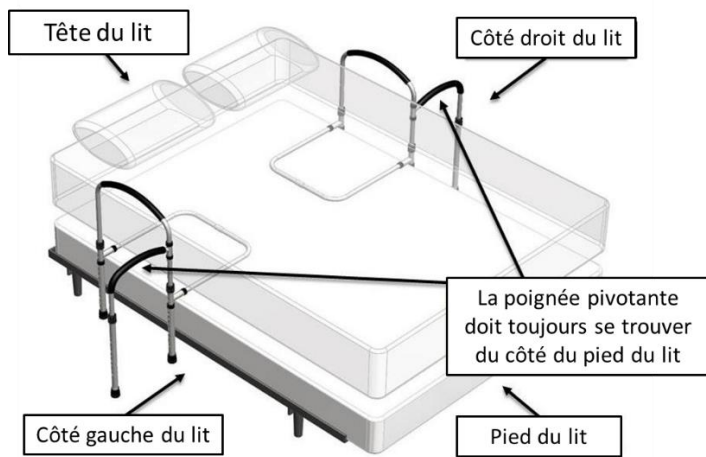


FIGURE 2

3. **IMPORTANT** : Placez le produit dans la bonne position en fonction du bord du lit où il sera installé, tel qu'illustré à la Figure 3.

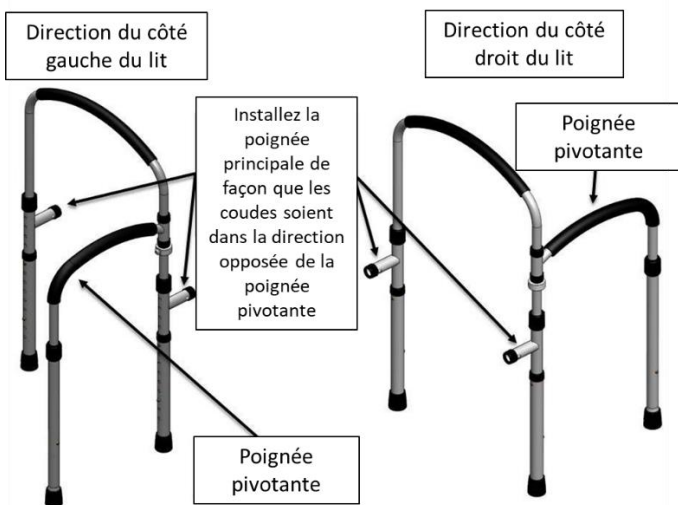


FIGURE 3

4. Assemblez les tubes de la base tel qu'illustré à la Figure 4.

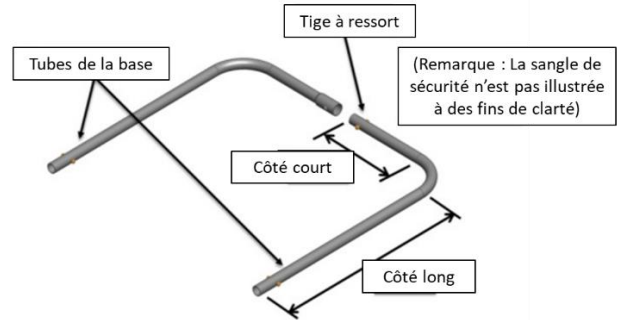


FIGURE 4

5. **REMARQUE** : La prochaine étape dépend du bord du lit où sera installé le produit. Fixez les tubes de la base dans les coudes, tel qu'illustré à la Figure 5. Vérifiez que les goupilles à ressort sont bien enclenchées dans les coudes.

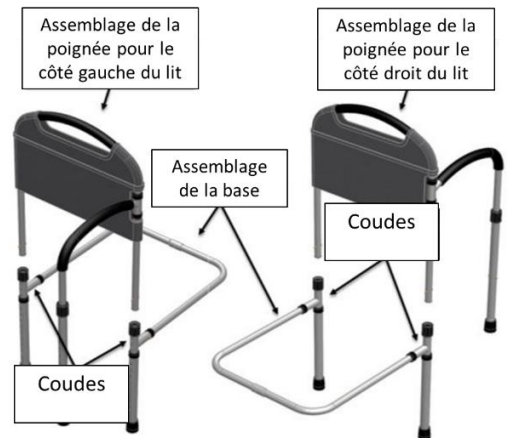


FIGURE 5

6. **Réglage de la hauteur de la poignée principale** : (voir la Figure 6) Une fois le Côté de lit installé, il reste à régler la hauteur de la poignée principale, ce qui se fait en desserrant les anneaux de serrage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Insérez l'assemblage de la poignée dans les anneaux. Alignez les trous à la hauteur désirée et insérez les goupilles. Resserrez les anneaux dans le sens des aiguilles d'une montre.

7. **Réglage de la hauteur des pieds de la poignée principale** : (voir la Figure 6) Une fois le Côté de lit installé, il reste à régler la hauteur des pieds en renfonçant les tiges à ressort de façon à pouvoir relever ou rabaisser les pieds à la hauteur désirée pour qu'ils s'appuient sur le plancher.

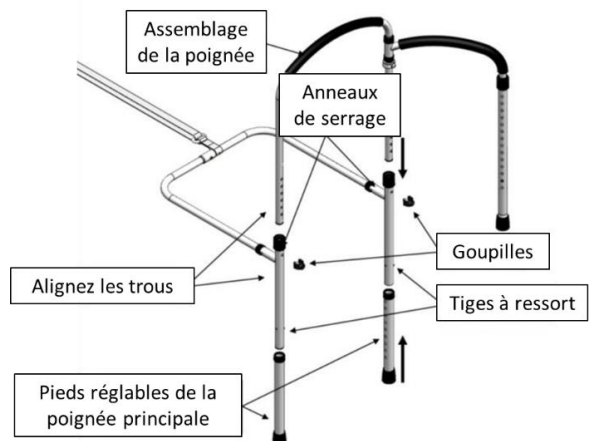


FIGURE 6

8. Réglage de la hauteur du pied de la poignée pivotante : (voir la Figure 7)

Une fois le Côté de lit installé, il reste à régler la hauteur du pied de la poignée pivotante en renfonçant la tige à ressort de façon à pouvoir relever ou rabaisser le pied à la hauteur désirée pour qu'il s'appuie sur le plancher.

Une fois la poignée pivotante à la bonne hauteur, glissez la pince de fixation contre la bague de pivot inférieure et serrez la vis à l'aide de la clé Allen fournie, tel qu'illustré à la Figure 7.

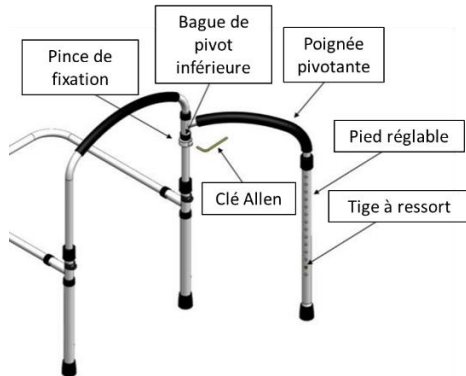


FIGURE 7

9. Mise en garde concernant le risque de coincement :
Attachez la SANGLE DE SÉCURITÉ au cadre du lit, tel qu'illustré à la Figure 8. Détachez la sangle et passez-la autour du cadre de lit, puis rattachez-la. Resserrez bien la sangle pour vous assurer que l'assemblage de la poignée est fermement fixé contre le matelas. N'installez PAS le produit sans bien fixer la SANGLE DE SÉCURITÉ autour du cadre de lit, tel qu'illustré à la Figure 8. Pour toute question, appelez Stander au (800) 506-9901 ou (435) 755-0453.

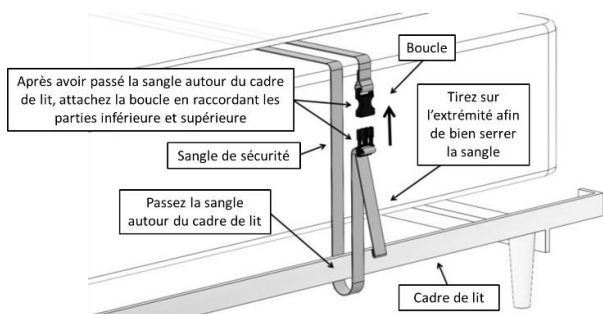
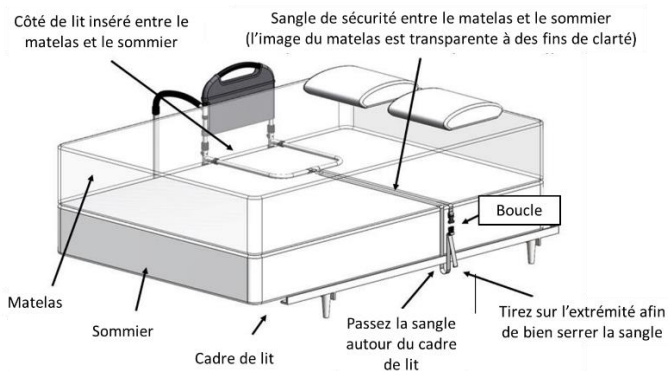


FIGURE 8

10. Mise en garde concernant le risque de coincement : Installez le revêtement en tissu par-dessus la poignée, tel qu'illustré à la Figure 9. N'utilisez PAS le produit sans installer le revêtement en tissu. NE modifiez D'AUCUNE façon le revêtement en tissu, car il contribue à prévenir le coincement (consultez les **Directives pour prévenir les risques de coincement** jointes aux présentes instructions).

REMARQUE : Assurez-vous que le produit est placé à au moins 32 cm (12,5 po) de la tête du lit pour prévenir les risques de coincement (consultez les **Directives pour prévenir les risques de coincement** jointes aux présentes instructions). En réglant la hauteur de la poignée à au moins 10 cm (4 po) au-dessus du matelas, on réduit également le risque d'enjambement du produit.

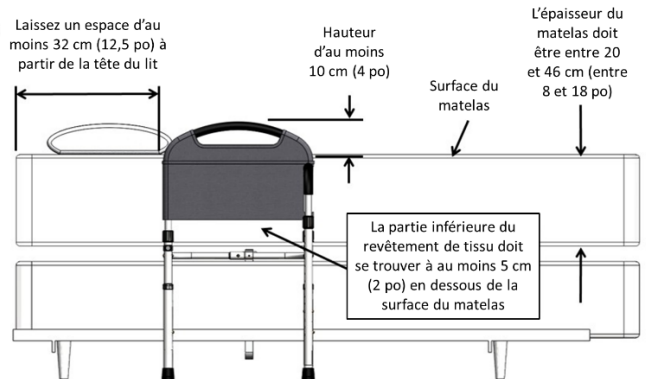


FIGURE 9

11. Il est important que le Côté de lit soit bien fixé contre le matelas. La sangle de sécurité passe autour du cadre de lit et est bouclée du côté opposé du lit, tel qu'illustré à la Figure 10.

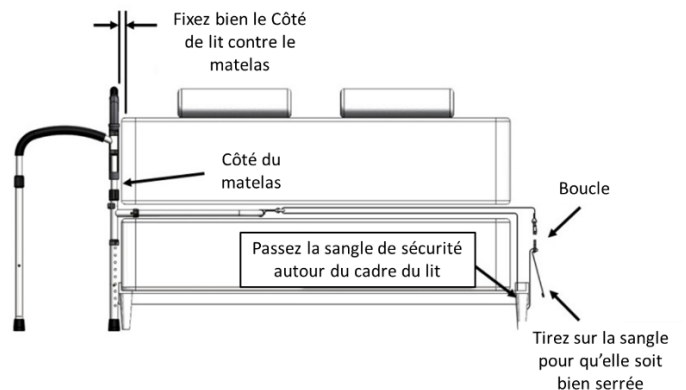


FIGURE 10