

警告：この製品を使用する前に必ずお読みください。

1. メトロウォーカーを意図した方法で使用しないと、重傷を負ったり死亡する可能性があります。Stander、Inc。は、安全な製品を提供し、事故を防ぐ方法をユーザーに通知することに取り組んでいます。

安全上のご注意：

- ✓ ウォーカーを定期的にチェックして、壊れた部品や緩んだ部品がないことを確認します。
  - ✓ 旅行中は、歩行者が投げたり落としたりしないように注意してください。これにより、コンポーネントが破損し、製品が安全でなくなる可能性があります。
  - ✓ リスクの高い状態にある場合は、この製品を使用しないでください。高リスクのユーザーには、精神的に首尾一貫していないユーザー（投薬中の個人を含む）、体重制限条件を超えるユーザー、またはウォーカーを使用する能力を損なう条件が含まれます。
  - ✓ これらの注意事項に関して懸念や質問がある場合は、Stander（1-800-506-9901）までご連絡ください。
2. 病気やけがをしたり、バランスや立ったり座ったりする能力に影響を与える薬を服用している場合は、この製品を使用する前にまず医師に相談してください。製品を適切に使用しないと、重傷を負ったり危害を及ぼす可能性があります。
  3. この製品は、個人の全重量を支えることを目的としていませんでした。この製品は、歩いたり、座ったり、立ったりする際のバランスとサポートを提供することのみを目的としています。
  4. 子供が製品にぶら下がったり遊んだりしないようにしてください。免責事項：Stander、Inc。も製造元も、製品の不適切な使用または組み立てに起因する可能性のある、または結果として生じたいかなる危害または傷害についても責任を負いません。

Stander、Inc。によるAble Lifeブランド製品のご購入おめでとうございます。これにより、日常生活が楽になることを願っています。保護のために、次の保証書をお読みください。

Stander、Inc。は、最初の購入者に対して、この製品が購入日から1年間、材料および/または製造上の欠陥がないことを保証します。保証期間中、Stander、Inc。は材料または製造上の欠陥を無料で修正します。ただし、最初の購入者は送料を前払いする必要があります。交換部品はすべて新品であり、元の保証の残りの期間、または出荷日から30日間のいずれか長い方の期間保証されます。最初の購入者は、保証期間中に、製造上の欠陥または材料の欠陥を書面でStanders、Inc。に通知する必要があります。この保証は譲渡できず、通常の使用のみを対象としています。配送料は返金されません。

保証は以下をカバーしません：

- ・小売業者への最初の出荷以外の出荷中の損傷。
- ・不正な添付、変更、または修正によって引き起こされた損傷。
- ・製品が設計または意図された目的以外の目的で製品を使用したことによって生じた損傷。
- ・その他の乱用、誤用、取り扱いの誤り、または誤用によって引き起こされた損傷。

いかなる状況においても、Stander、Inc. は、この限定保証の違反、契約違反、または厳格責任に基づく特別損害、偶発的損害、または結果的損害に対して責任を負わないものとします。

本書の説明を超えて拡張される保証はありません。明示または黙示を問わず、その他すべての保証（商品性または特定目的への適合性に関するすべての黙示の保証を含む）は、ここに否認されます。

一部の州では、黙示の保証の期間の制限が許可されていないため、上記の制限が適用されない場合があります。この保証はあなたに特定の法的権利を与えます、そしてあなたはまた州ごとに異なる他の権利を持っているかもしれません。

この保証に基づくサービスを受けるには、Stander Inc.（1615 Quail Way、Logan、Utah 84321）に連絡するか、1-800-506-9901に電話してください。当社の他の製品を表示するには、当社のWebサイト[www.ablelifesolutions.com](http://www.ablelifesolutions.com)にアクセスしてください。

この製品を使用する前に、安全上の注意と指示をお読みください。

#### ウォーカーを開く

メンテナンス：ウォーカーは、アルミニウムチューブに沿ってスライドするプラスチックジョイントに潤滑剤が塗布されています。この潤滑剤は最終的に乾燥し、歩行者の開閉がより困難になります。これが発生した場合、プラスチックジョイントとアルミニウムチューブの間にスプレーする推奨潤滑剤はWD-40です（[www.wd40.com](http://www.wd40.com)を参照）。これは、Lowe's、True Value Hardware、Rite Aid、Office Depot、Home Depot、Target、Fred Myer、Napa、Walgreen'sなどのストアから入手できます。

図1に示すように、ハンドルをできるだけ離して引きます。図2に示すように、ロッキングパッドを押し下げて、ウォーカーを開いた位置にロックします。

注：ロッキングパッドに座ったり、5ポンドを超える下向きの重量をかけたりしないでください。

#### 高さ調整

図5に示すように、フロントレッグチューブからノブとボルトを取り外します。

ハンドルを希望の高さまで上下に配置します。

図5に示すように、ハンドルチューブの穴をフロントレッグチューブの穴に合わせ、ボルトを再度挿入してノブを締めます。

#### スキッドの交換

この情報は、将来の参照用です。新しく購入したウォーカーのプラスチック製の脚（スキッド）を交換しないでください。

図6に示すように、リアレッグチューブからボルトを取り外します。

プラスチック製の脚（スキッド）を下方方向に引いて、摩耗したプラスチック製の脚（スキッド）を取り外します。

摩耗したプラスチック製の脚（スキッド）を新しいプラスチック製の脚（スキッド）に交換し、ボルトを下の図に示す新しいプラスチック製の脚（スキッド）にねじ込みます。

ウォーカーを閉じる

図3に示すように、パッドを引き上げてウォーカーを閉じ始めます。図4に示すように、ハンドルを一緒に押してウォーカーを閉じます。