

組立説明：

1. 図1に示すように、箱からすべての部品を取り出し、各アイテムに慣れてください。

注：図2は、2つの異なる方法で使用されている組み立て済み製品を示しています。一部の椅子、リクライニングチェア、およびソファでは、製品フレームをクッションの上に配置する必要があります（クッションを取り外すことができないため）、一部の椅子、リクライニングチェア、およびソファでは、製品フレームをクッションの下に配置できます。

2. 製品を組み立てる前に、製品のフレームをクッションの上に置くか、クッションの下に置くかを決定します。次に、ハンドルの希望の高さ、および組み立てられたフレームの幅と深さを決定して、椅子、リクライニングチェア、またはソファに合わせます。

3. ハンドルアセンブリをサポートアセンブリに挿入し、ハンドルアセンブリを希望の高さに調整します。図3に示すように、四角いボルトと丸いナットを使用してハンドルアセンブリを固定します。

注：四角いボルト（四角い首のボルト）は常に四角い穴に組み立てられ、丸いナットは常に丸い穴に組み立てられます。

注：安全上の理由から、ハンドルアセンブリは図3に示す方向にのみ組み立ててください。

4. ベースチューブをサポートアセンブリに挿入します。図4に示すように、ベースチューブを椅子、リクライニングチェア、またはソファに合うフレームの深さに調整し、四角いボルトと丸いナットでベースチューブを固定します。

5. ベースチューブをベースコネクタチューブに挿入します。ベースチューブを椅子、リクライニングチェア、またはソファに合うフレーム幅に調整し、図5に示すように、ベースチューブを四角いボルトと丸いナットで固定します。

6. 図6に示すように、製品を椅子、リクライニングチェア、またはソファに置き、スプリングピンを押し下げて脚を床に合わせます。

安全上のご注意：

1. 製品が正しく取り付けられていないと、重傷を負ったり危害を及ぼす可能性があります。StanderInc. のAbleLifeブランドは、安全な製品を提供し、事故を防ぐ方法をユーザーに通知することに取り組んでいます。

定期的に製品をチェックして、スクエアボルトとラウンドナットが固定されていることを確認してください。

調整可能な脚が常に床に接触していることを確認してください。

リスクの高いユーザーには、追加の安全対策を講じる必要があります。高リスクのユーザーには、精神的に意識のないユーザー（投薬中の個人を含む）、サイズや体重の状態があるユーザー、または支援なしで製品を使用する能力を損なう状態のユーザーが含まれます。

これらの注意事項に関して懸念や質問がある場合は、StanderInc. のAbleLifeブランド（1-800-506-9901）にお問い合わせください。

2. 病気やけがをしたり、バランスや立ったり座ったりする能力に影響を与える薬を服用している場合は、この製品を使用する前にまず医師に相談する必要があります。製品を適切に使用しないと、重傷を負ったり危害を及ぼす可能性があります。

3. この製品は、個人の全重量を支えることを目的としていませんでした。この製品は、座ったり立ったりしながらバランスとサポートを提供することのみを目的としています。

4. 子供が製品にぶら下がったり遊んだりしないようにしてください。

5. 免責事項：Stander Inc.も製造業者も、製品の不適切な使用または組み立てから生じる可能性のある、または生じたいかなる危害または傷害についても責任を負いません。

限定的保証：

StanderInc. によるAbleLifeブランド製品のご購入おめでとうございます。これがあなたの日常生活を楽にしてくれることを願っています。保護のために、次の保証書をお読みください。

StanderInc. のAbleLifeブランドは、この製品が購入日から1年間、材料および/または製造上の欠陥がないことを最初の購入者に保証します。

保証期間中、StanderInc. のAbleLifeブランドは、材料または製造上の欠陥を無料で修正します。ただし、最初の購入者は送料を前払いする必要があります。交換部品はすべて新品であり、元の保証の残りの期間、または出荷日から30日間のいずれか長い方の期間保証されます。最初の購入者は、保証期間中に、製造上の欠陥または材料の欠陥を書面でStanderInc. に通知する必要があります。この保証は譲渡できず、通常の使用のみを対象としています。配送料は返金されません。

保証は以下をカバーしません：

- 小売業者への最初の出荷以外の出荷中の損傷。
- 不正な添付、変更、または修正によって引き起こされた損傷。

- 製品が設計または意図された目的以外の目的で製品を使用したことによって生じた損傷。
- その他の乱用、誤用、取り扱いの誤り、または誤用によって引き起こされた損傷。

いかなる状況においても、Stander Inc.は、この限定保証の違反、契約違反、または厳格責任に基づく特別損害、偶発的損害、または結果的損害に対して責任を負わないものとします。

本書の説明を超えて拡張される保証はありません。明示または黙示を問わず、その他すべての保証（商品性または特定目的への適合性に関するすべての黙示の保証を含む）は、ここに否認されます。

一部の州では、黙示の保証の期間の制限が許可されていないため、上記の制限が適用されない場合があります。この保証はあなたに特定の法的権利を与えます、そしてあなたはまた州ごとに異なる他の権利を持っているかもしれません。

この保証に基づくサービスを受けるには、Stander Inc.（1-800-506-9901）に連絡してください。