

警告：この製品を使用する前に必ずお読みください。

1. ベッドレールが正しく取り付けられていないと、重傷を負ったり死亡する可能性があります。閉じ込めは負傷と死をもたらしました。閉じ込めとは、個人がベッドレールと他の物体の間に挟まれる可能性がある状況です。個人の頭、体、腕、または脚の可能性は、ベッドレールのバーの間、ベッドレールとベッドの頭またはフットボードの間、またはベッドレールとマットレスの間に閉じ込められる可能性があります。家庭用ベッドレールに関する具体的なガイドラインはありませんが、Stander Inc.は、安全な製品を提供し、事故を防ぐ方法をユーザーに通知することに取り組んでいます。
2. Stander Inc.には、（必要に応じて）安全ストラップと保護ベッドレールカバー（ベッドレールフレーム内の開口部を覆う素材）が装備されています。常に安全ストラップと保護ベッドレールカバー（一般にオーガナイザーと呼ばれます）を使用してください。安全ストラップと保護カバーなしでベッドレールを使用しないでください。これらのデバイスは、起こりうる閉じ込め状態を最小限に抑えます。

安全上のご注意：

- ベッドレールを定期的にチェックして、閉じ込められている可能性のある領域を特定します。
- ベッドレールとベッドのヘッドボードまたはフットボードの間に頭が挟まれないように、ベッドレールをベッドのヘッドボードまたはフットボードから離して配置します。
- ベッドレールとマットレスの側面の間に隙間がないことを確認してください。隙間があると、ユーザーがベッドレールとマットレスの間に挟まれる可能性があります。
- リスクの高いユーザーには、追加の安全対策を講じる必要があります。そのようなユーザーには、精神的に意識のないユーザー（投薬中の個人を含む）、ベッドレールとマットレスの間のギャップを変える可能性のあるサイズまたは体重の状態のユーザー、および一般に目覚めているか眠っている間落ち着かないユーザーが含まれます。
- これらの注意事項に関して懸念や質問がある場合は、Stander Inc.（1-800-506-9901）までご連絡ください。

3. 病気やけがに苦しんでいる場合、またはバランスや立ったり座ったりする能力に影響を与える薬を服用している場合は、この製品を使用する前にまず医師に相談する必要があります。製品を適切に使用しないと、重傷を負ったり危害を及ぼす可能性があります。
4. この製品は、個人の全重量を支えることを目的としていませんでした。この製品は、座ったり立ったりしながらバランスとサポートを提供することのみを目的としています。
5. 製品が適切に組み立てられ、配置されていることを確認するために、製品の指示に注意深く従う必要があります。指示に従わないと、製品のユーザーに重大な傷害をもたらす可能性があります。
6. 子供が製品にぶら下がったり遊んだりしないようにしてください。
7. マットレスの重量がベッドレール製品を支えるのに十分であることが重要です。ベッドレールはあまり適しておらず、軽量フォームやその他の軽量マットレスと一緒に使用しないでください。
8. 免責事項：Stander、Inc.も製造業者も、製品の不適切な使用または組み立てから生じる可能性のある、または生じたいかなる危害または傷害についても責任を負いません。

限定的保証

ベッドレール製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。それがあなたの日常生活を楽にしてくれることを願っています。保護のために、次の保証書をお読みください。Stander Inc.は、最初の購入者に対して、この製品が購入日から1年間、材料および/または製造上の欠陥がないことを保証します。保証期間中、Stander Inc.は材料または製造上の欠陥を無料で修正します。ただし、最初の購入者は送料を前払いする必要があります。交換部品はすべて新品であり、元の保証の残りの期間、または出荷日から30日間のいずれか長い方の期間保証されます。最初の購入者は、保証期

間中に、製造上の欠陥または材料の欠陥を書面でStanderInc.に通知する必要があります。この保証は譲渡できず、通常の使用のみを対象としています。送料は返金されません。

保証は以下をカバーしません：

- 小売業者への最初の出荷以外の出荷中の損傷。
- 不正な添付、変更、または修正によって引き起こされた損傷。
- 製品が設計または意図された目的以外の目的で製品を使用したことによって生じた損傷。
- その他の乱用、誤用、取り扱いの誤り、または誤用によって引き起こされた損傷。

いかなる状況においても、Stander Inc.は、この限定保証の違反、契約違反、または厳格責任に基づく特別損害、偶発的損害、または結果的損害に対して責任を負わないものとします。

ここに記載されている内容を超える保証はありません。明示または黙示を問わず、その他すべての保証（商品性または特定目的への適合性に関するすべての黙示の保証を含む）は、ここに否認されます。

一部の州では、黙示の保証の期間の制限が許可されていないため、上記の制限が適用されない場合があります。この保証はあなたに特定の法的権利を与えます、そしてあなたはまた州ごとに異なる他の権利を持っているかもしれません。

この保証に基づくサービスを受けるには、Stander Inc。（（800）506-9901）に連絡してください。

指示：

1.ボックスからすべてのコンポーネントを取り出し、図1に示すようにアイテムに慣れます。

2.付属のアレンヘッドレンチを使用して、トップレールをボトムレールに挿入し、図2に示すように、レールをロングソケットボルト、ショートソケットボルト、および2つのロックナットで固定します。

注：長いソケットボルトは大径のチューブを通り、短いソケットボルトは小径のチューブを通ります。

3.重要：ベースチューブは、製品を使用するベッドのどちら側に応じて、2つの異なる方法で組み立てることができます。図3に示すように、ベッドのどちら側に製品を取り付けるかを決定してから、図4に示すようにベースチューブを取り付けます。

4.重要：ベースチューブを取り付ける前に、ベースチューブが互いに異なることに注意してください。

- 穴（ボルトがベースチューブに貫通する穴）は、互いに異なる角度になっています。
- 各ベースチューブには、四角い穴と丸い穴の両方があります。
- 組み立てられると、ベースチューブは図3に示すように外側に角度が付けられます。
- ベースチューブの四角い穴は外側を向き、丸い穴は内側を向く必要があります。
- 図4に示すように、ボルトは四角い穴に挿入され、丸い穴から出ます。

付属のオープンエンドレンチを使用して、ボトムレールをベースチューブに挿入し、図4に示すように、キャリッジボルトとロックナットで固定します。

5.組み立て後、ベッドのマットレスとボックススプリングの「間に」製品を置き、安全ストラップをベッドの反対側のレールに固定します。また、図5に示すように、ベッドレールの垂直エッジをベッドの頭から約18インチ離して配置します。

ノート：

- ・ベッドレールを延長するためのPUSHレールボタン（図1を参照）。
- ・固定側は常にベッドの頭に最も近く、拡張可能側は常にベッドの足に最も近いです。
- ・ベースチューブが適切に組み立てられると、それらは互いに外側に角度を付けます。
- ・ベースチューブは、ベッドのマットレスとボックススプリングの間にあります。